


DECUBIMAT 360 / SURCON.

Juli 2014

Speciel luftpumpeaggregat og PU- veksletryks- madras til understøttelse i forebyggelse- og behandling af tryksår m.m.

- Sår stadie I-II - Kategori EPUAP Norm. NB: se trykmåling på side 5.
- Personvægt op til ca. 120kg - madrassbelastning max. 140kg (i liggende position).
- PU-transparent madras i ny udgave med "air-flow"- system med laser - perforerede huller på madrassens overside (slangesiden).
- Transpirationsminimering og forbedret mikroklima på huden.
- Trinløs støjsvag regulerbar pumpe m/vægt skala indstilling (fra personvægt ca. 40-120kg).
- Pumpe med mulighed for individuel trykstyring - med visuel alarm.
- Robust aggregat fra Hospitalwerk Hirtz & Co. Köln, der er kendt for pumper med lang holdbarhed.
- Anvendes oven på en skummadrass eller lignende. NB: t i et vende-system kan kobles på boblemadrass sammen med undermadrass!
- **CE mrk.**

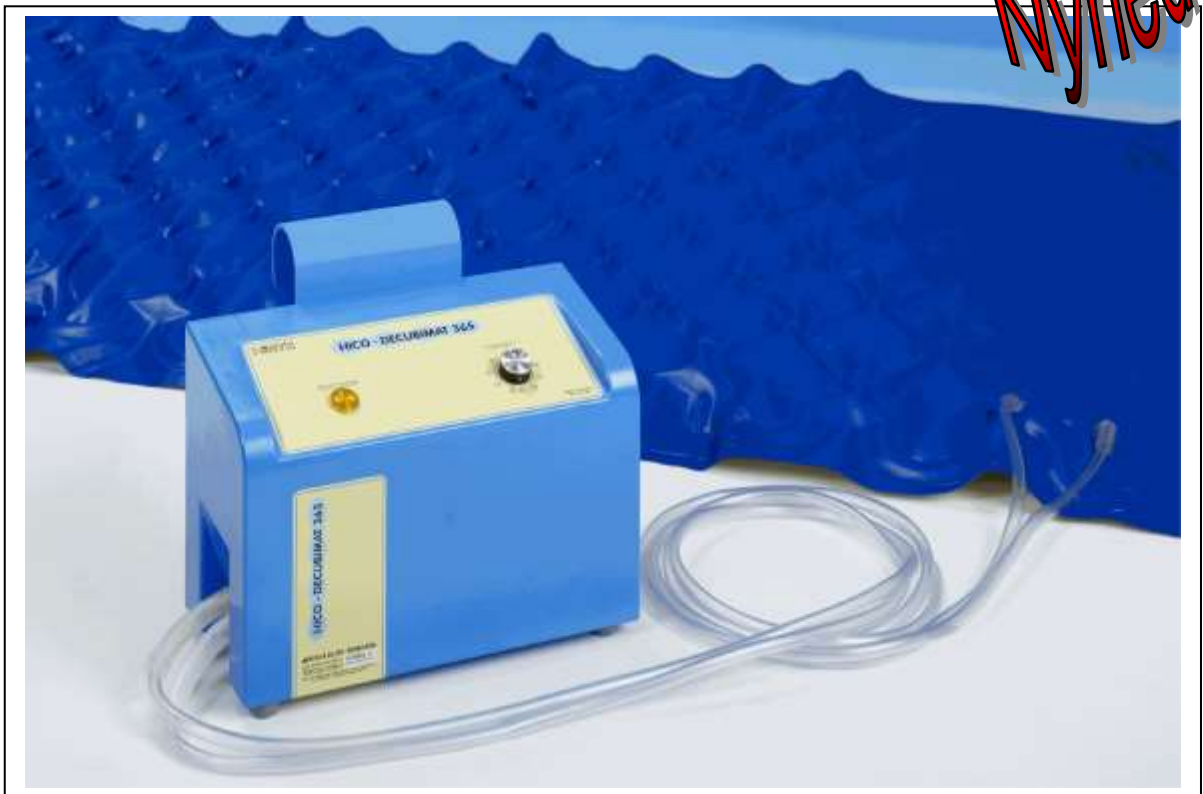

HMI NR.: 17341 (scøt)


(Surcon varenummer: 03 -17. 341)

SURCON CARE LINE ApS.

Indstillingsskala til Decubimat 360 vekseltryks system og specifikationer.

Decubimat 365 pumpe = Pumpenavn.

HMI NR.: 17341

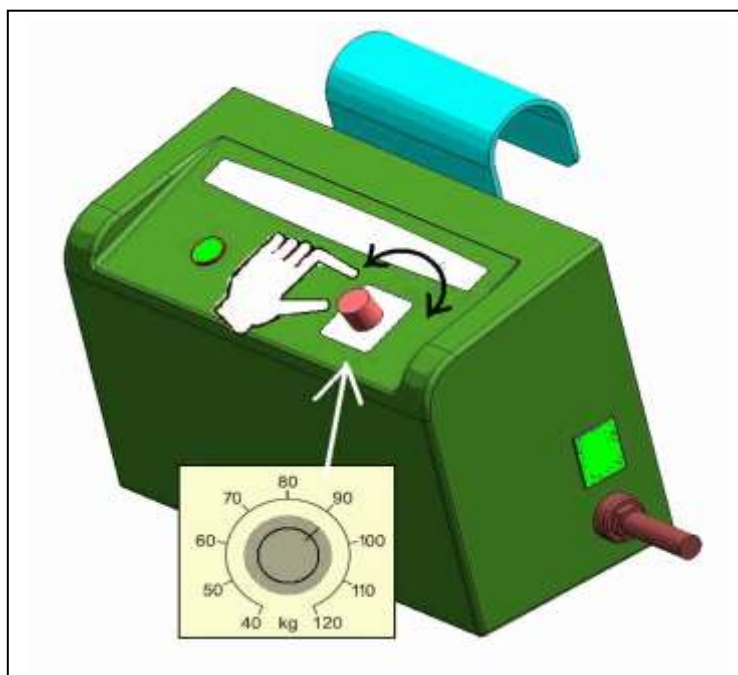

Vejledende personvægt indstilling

Specifikationer 360 system.

PUMPE ID nr.: 365

Tekniske data: 365 pumpe

Spænding 230 Volt

AC/50Hz

Strømforbrug 8W
ca. 25 øre/døgn

Mål: 165 x 300 x
120mm

Vægt: ca. 2.6 kg

Godkendelser: 93/42/EWG

PU/polyurethan madras med
"laser – luftventilerings" huller
midt på madrassen.

Mål: luftfyldt. 1800 x
800 x 60mm

Kg 2,2kg.

Person vægt op til

Med venlig hilsen
Surcon Care Line ApS
END!

V

SURCON CARE LINE, Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup.

DECUBIMAT 360 TOPMADRAS VEKSELTRYKSSYSTEM Data / INSTALLATION & BRUGSANVISNING.

Sæt: HMI NR. 17341.

Pumpe 365 alene = HMI nr. 70413 / PU madras HMI = 42724.

Juli 2014

Installering af top PU/madrassen - med "air loss" for at reducere kropssved.

Madrassen: brugervægt max. belastning 140kg (i liggende position).

Madrassen foldes ud og lægges på sengen. **NB: HUSK at slangerne skal placeret opad mod brugeren og i fodenden.**

Det er vigtigt, at madrassen pålægges undermadrassen **med slangerne øverst**, da laser ventilations hullerne findes på denne side. Modvirker sveddannelse!

Luftslangerne bør være i fodenden, da det mindsker forstyrrelse ved luftskifte, men er det er ikke et krav! Stik enderne af madrassen ned om sengemadrassen og afdæk til sidst med et lagen. Komforten for brugeren er et vigtigt element, kan evt. forbedres ved lægge et tyndt varmt tæppe ovenpå selve madrassen (2-3mm.), hvis der er brug for en bedre komfort eller et varmere underlag, det er vigtigt, at brugeren undgår at fryse, men husk at kontrollere med håndmetoden, at man mærker veksel-trykket igennem.

NB:

LUFTSLANGERNE MÅ ALDRIG AFMONTERES PÅ MADRASSEN, da slangerne er fastlimet på madrassens indgangsstudse.

Installering af selve pumpen (blå HICO 365 pumpe).

Luftslangerne fra madrassen sættes på pumpens 2 luftudgangsstudse (rækkefølgen er under-ordnet). Pumpen tilsluttes stikkontakt og tændes. Pumpen kan enten hænges på sengegavlen eller stilles på gulvet. Forlænger slanger kan fås. Ved ophængning på sengegavlen kan man lægge lægges et stykke klæde eller skumgummi imellem senge gavl og pumpens ophængs bøjle. Nogle typer senge kan give mere resonans end andre!

Generelle oplysninger:

Husk: Pumpen må aldrig tildækkes, eller være i funktion i nærheden af ild eller gasser!

Det tager ca. 20 minutter fra opstart til top madrassen er luftfyldt. Man behøver nødvendigvis ikke vente med at lægge brugeren på madrassen til den er luftfyldt, da det er en top madras.

Cyklustid: ca. 6 minutter begynder at skifte hvert 3. min.

Hvis man anvender andre plast- materialer som afdækning med lav molekylære blødgørere (**plastmaterialer, der lugter af plastik**), kan disse diffundere ind i madrassen og på længere sigt nedbryde en ellers blød madras - (madrasserne må ikke blive stive eller misfarvede).

Rengøring af 365 pumpe og PU-madras:

PUMPE: Pumpen kan rengøres med alm. sæbe og vand på en opvredet klud, og tør efter med en tør klud, fedtpletter/farver osv. kan fjernes med lidt rensed benzin på en klud.

Madras: Madrassen kan rengøres med alm. sæbe og vand. Brug en opvredet klud, og tør efter med en ren og tør klud. **Brug aldrig rengøringsmidler indeholdende ISOPROPANOL, SPRIT (alkohol) eller TENSIDER.** Desinficering af pumpe og madras: kan aftørres/forstøves med gængse midler **uden indhold af tensider og alkohol** og eftertørres efter nogle minutter - spørg kemikalieleverandøren vedr. produktvalg! Små pletter (olie o.s.v.) på madras eller pumpe kan aftørres med lidt rensed benzin på en opvredet klud.

Med venlig hilsen

Surcon Care Line ApS - tlf. 86 55 70 45.

Råd og tips VEND >>

**RÅD & TIPS VEDR. KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE AF - D E C U B I M A T
360 vekseltryks topmadras-system.**

Vekseltryksystemet kører ofte 24 timer i døgnet året rundt. Det derfor det vigtigt, at pumpe og madras fungerer optimalt, af hensyn til brugeren men også af hensyn til luftventileringen "air loss" fra selve madrassen (for luft-ventilering af kroppen).

For at spare Dem for unødvendige udgifter til forsendelse, tid og betaling for at få udbedret alm. Små reparationer og udskiftning af reservedele, anfører vi her nogle tips, der kan være til hjælp for Jer.

A. Pumpen:

Alarmen knappen på pumper vil lyse, såfremt der opstår problemer med systemet.

Den hvide filtprop på selve kompressoren/luftpumpen inde i pumpe-kabinettet bør udskiftes ved personskift, eller efter behov hvert ½ til 1/1 årligt. I lokaler hvor der ryges, er megen støv eller forekommer fedtdampe, kan filter tilstoppes, (den bliver mørk og snavset). Holdbarheden forlænges ved at holde kompressoren fri for tilstopning.

B. Madrassen:

Ved et system- eller madrasproblem, kan man ved anvendelse af en kompressor i løbet af få minutter kontrollere, om der er problem ved madrassen.

Lapning: De små mikroskopiske laser- ventilationshuller, der vender opad midt på madrassen, skal selvfølgelig ikke lappes. Ved en evt. lapning af et hul renses stedet med lidt rensed benzol på en klud tørres efter, og påfør så rigeligt med lim - sæt straks lappen på og tryk til med en klud, (kluden suger så evt. overskydende lim), lidt talkum kan drysses på, når stedet er ved at være tørt. I løbet af 1 time vil lappen normalt kunne holde (selvfølgelig afhængig af temperaturen). Ca. 1 time efter lapning vil det være en god ide igen at foretage en ny trykprøve kontrol, for at kontrollere holdbarheden af reparation omkring lappedet.

VIGTIGT: ANVEND ALDRIG UORIGINALT LAPPEGREJ TIL MADRASSERNE.

Lappe sæt hvor lapperne passer til madrasserne kan fås ved Surcon - ligeledes diverse reservedele til pumperne.

NB: Ovennævnte madras kontrol udføres hurtigst med en luftkompressor, så man hurtigt kan finde ud af, om det er madrassen eller pumpen, der er fejl ved. Det er nævnt her som en orientering.

NB: Kontakt Jeres tekniker / pedel, Hjælpemiddeldepot, **eller ring til Surcon for evt. råd og vejledning!**

SURCON CARE LINE ApS. tlf. 86 55 70 45.

Bilag 1.

Eks. på trykmåling:

Dato 2013

Ved følgende trykmåling er Decubimat 360 vekseltryksystem **med ny type PU madras** og Ducubimat 365 pumpe anvendt (sæt = HMI Nr.: 17.341)

Undermadrassen er en trygsårs forebyggende speciel mix. skumtype under madras: **ekaFlex S - (Kategori I – III, efter EPUAP - NPUAP). EkaFlex S har: HMI NR: 64774.**

Afprøvet ved person:

Personvægt: 75kg.

Personhøjde: 1.80cm.

