

A/D-SURCON lejringspuder

TIL UNDERSTØTTELSE I TERAPIEN / PROFYLAKSE

Håndbog & lejrings- anvisning.

A/D-SURCON lejringspuder til understøttelse i terapien.

Med denne serie af lejringspuder fra **SURCON** får man et bredt sortiment af puder, der dækker de flestes behov for en forbedret støtte og aflastning. Med få lejringspuder, er det muligt at få en god og stabil positionering af brugeren i forbindelse med forebyggelse, pleje eller ved behandling af f.eks. vævs skader, tryk sår eller til understøttelse ved aflastning i en ryg lejringsposition bl.a. i forbindelse med lunge- og luftvejsproblemer.

Lejringspuderne er også velegnet til at understøtte nervøse/urolige personer da puderne giver en beroligende effekt samt en øget liggekomfort.

Fordele:

- Tilpasser sig patientens morfologi, da puden er blød og formstabil på grund af fyldets blandingsforhold.
- Bielastisk PU betræk
- Behageligt materiale
- Fugt og varme ledes bort
- Åndbart betræk
- Ugennemtrængeligt for over for blod, urin, mv.
- Flammehæmmende materiale
- Ekstra betræk kan fås, også betræk i f.eks. Jersey
- Mulighed for nogle puder med inder pose og yderbetræk med lynlås
- Mulighed for fremstilling af specielle puder efter ønske!

For nærmere information, kontakt venligst **SURCON Care Line ApS**.


Denne manual beskriver nogle af de vigtigste indsættelses muligheder med de forskellige lejringspuder.

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

Hvis man er sengeliggende, immobil eller har svært ved at kunne bevæge sig ved egen hjælp (forandre sin kropssposition), er man i risikozone for at udvikle tryk sår, også hvis der forligger div. sygdomme som f.eks. stofskifte sygdomme, dårlig blodcirkulation m.v. Det er normalt for alle mennesker selv at kunne forandre sin ligge eller siddeposition, derfor er det meget vigtigt at erstatte den mangelfulde fysiske aktivitet på anden vis, såfremt mobiliteten er mangelfuld!

Ved at omlejre brugeren efter et planlagt tidsinterval, afhængig af brugerens tilstand, kan man understøtte den manglende fysiske aktivitet. Til dette anvendes specielle lejringspudder fra Surcon. Det skal understreges, at det er også vigtigt at brugeren ligger på en god trykaflastende madras- eller en vekseltryks madras tilpasset den aktuelle tryksårskategori.

Kontakt os på 8655 7045 for yderlig information vedr. specielle trykaflastende madrasser eller vores nyudviklede innovative automatiske vendesystem ”**ekamove**”.

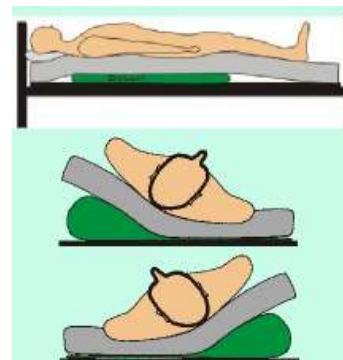


Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

30° lejrning.


30° lejrning anses for den letteste men også en god måde at lejre en bruger på, da denne type lejrning kan udføres alene af en hjælper. Desuden er det også den bedste lejringsvinkel, såfremt der er tale om en cachexia person. Personer med lungeproblemer henvises til en speciel anvisning fra læge, fysioterapeut m.fl.

30 gr. lejrning er også den mindst risikable lejrning - hvis udført korrekt - da hverken trochanter eller kors ben her bliver belastes så hårdt.


Vær opmærksom at brugeren ligger på en god madras, vælg en madras, der passer til brugers sygdomsbillede.

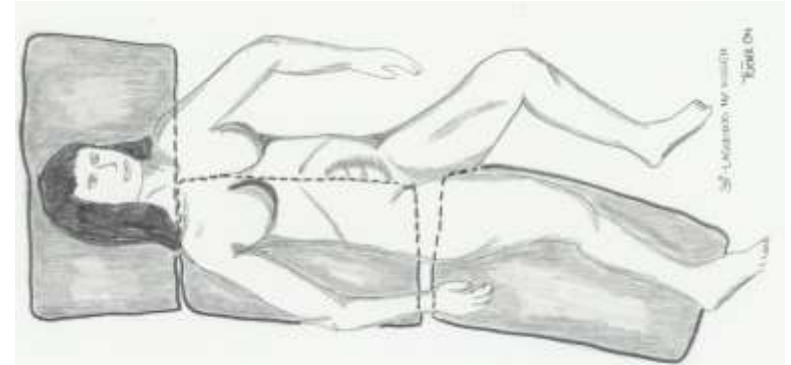

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

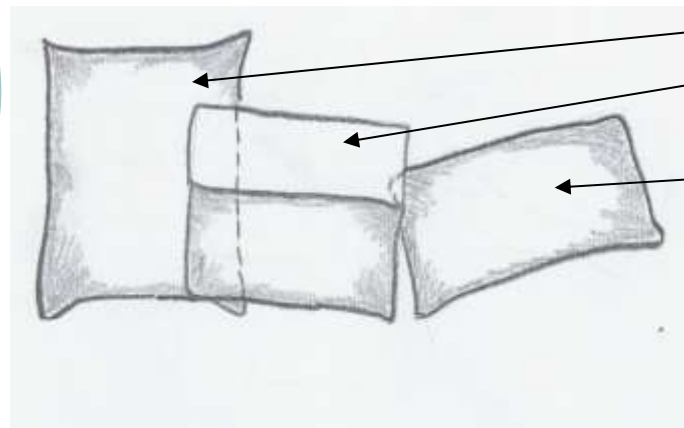

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 85 x 85cm. ryg pude med fane (den fyldte del: 40x85cm.) nr. 4158-05, HMI nr. 55583.
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.

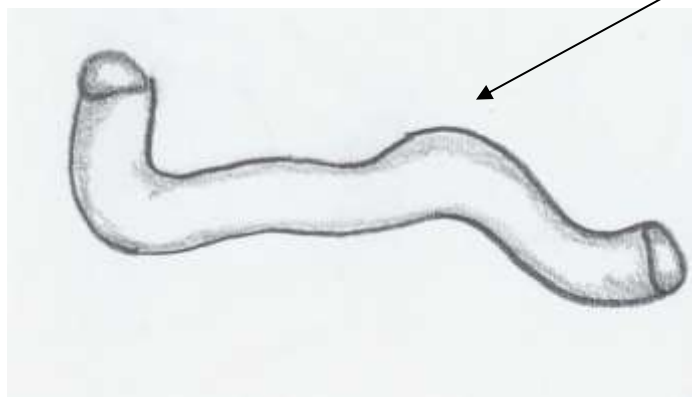


- 30 x 260cm. slangepude, ”Sø-slange” nr. 4164-05, HMI nr. 55598 – **også velegnet til 135 graders lejrning.**
- Der kan også indsættes følgende puder:
 - Slangepude 30 x 200cm. nr. 4163-05, HMI nr. 55597
 - Lejringsrulle 20 x 100cm. nr. 4160-05, HMI nr. 55594
 - Lejringsrulle 20 x 200cm. nr. 4161-05, HMI nr. 55595
 - Lejringsrulle 20 x 260cm. nr. 4162-05, HMI nr. 55596
 - U-form pude, L: 160cm. nr. 4165-05, HMI nr. 55592
 - U-form pude, L: 190cm. nr. 4166-05, HMI nr. 55593

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse


Halebens regionen og hælene er et af de mest sårbare områder, da disse steder udsættes for et kraftigt tryk, derfor dannes netop her oftest tryksår eller trykmærker. Specielt på disse kropsdele er det vigtigt at lave en effektiv forebyggelse / aflastning.

135 graders lejrning.


Ved 135 graders lejrning aflastes halebens regionen samt hælene. Her vil Slangepuden være en ideel løsning.

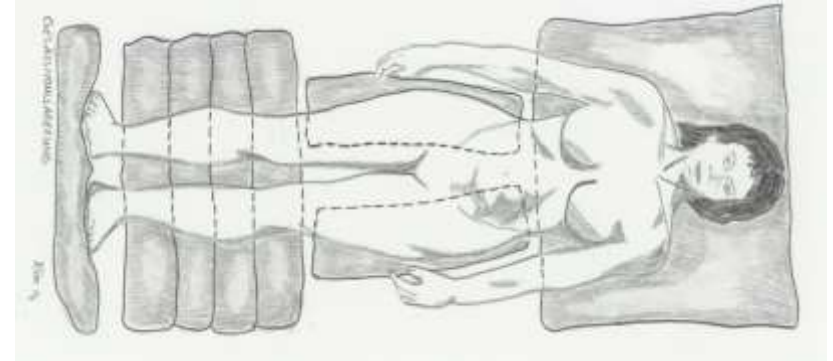

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

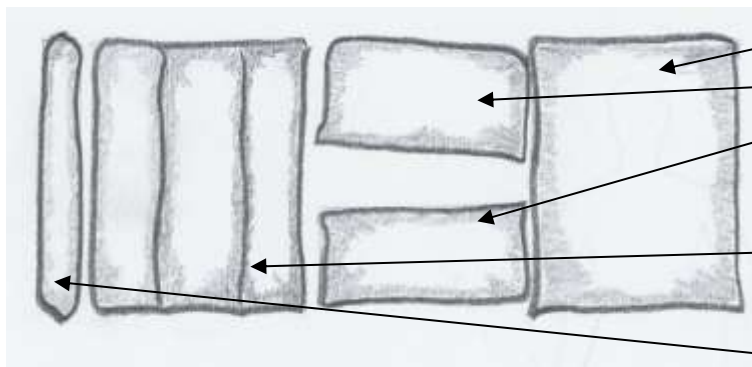

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 40 x 75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578.
- 40 x 75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578
- 80 x 80cm. universal pude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580

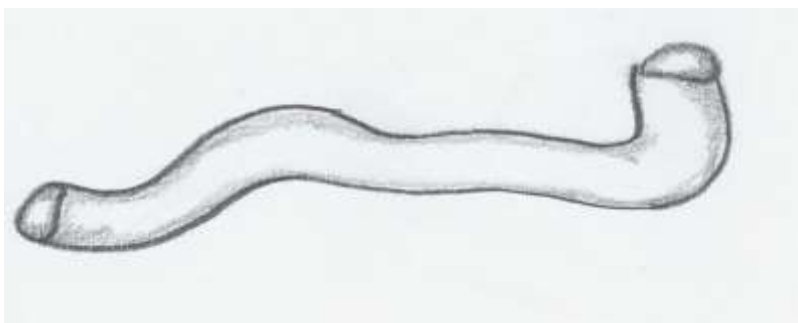


30 x 260cm. slangepude, nr. 4164-05, HMI nr. 55598

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi


Halvside lammelse.

Ved lejrning på den svage side stimuleres personens fornemmelse for denne side, og selve stimulationen vil kunne reducere forekomsten af kontraktør og forebygge tryk sår.


Det er vigtig at personen efterfølgende omlejres på den anden side efter et nærmere **individuel fastlagt tidsinterval**.

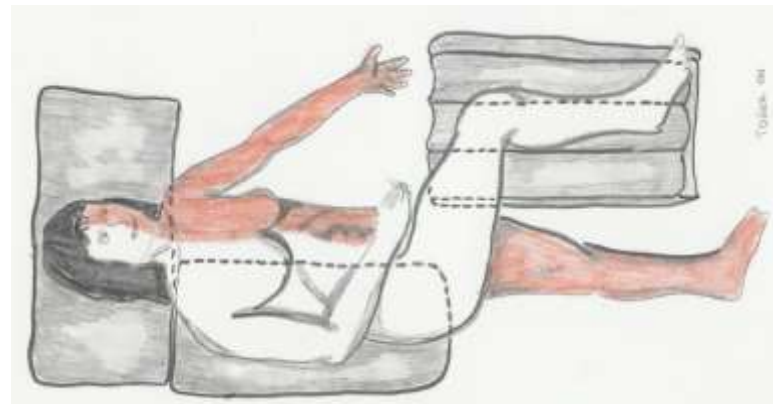

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi

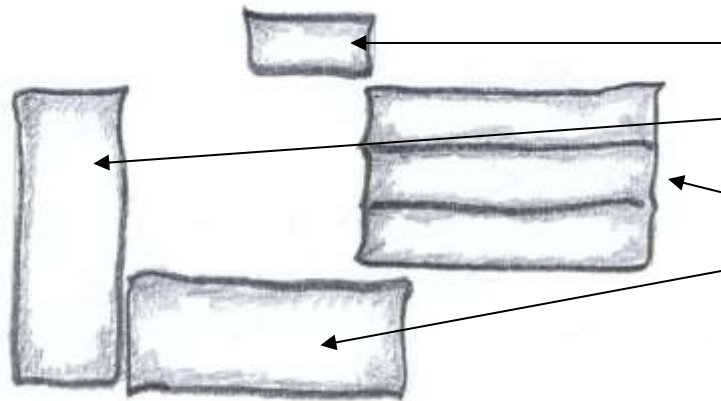


- 30 x 40cm. lejringspude, nr. 4152-05, HMI nr. 55579.
- 40 x 95cm. lejringspude, nr. 4156-05, HMI nr. 55576.
- 80 x 80cm. universalpude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582
- 50 x 85 x 6cm. flad lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.

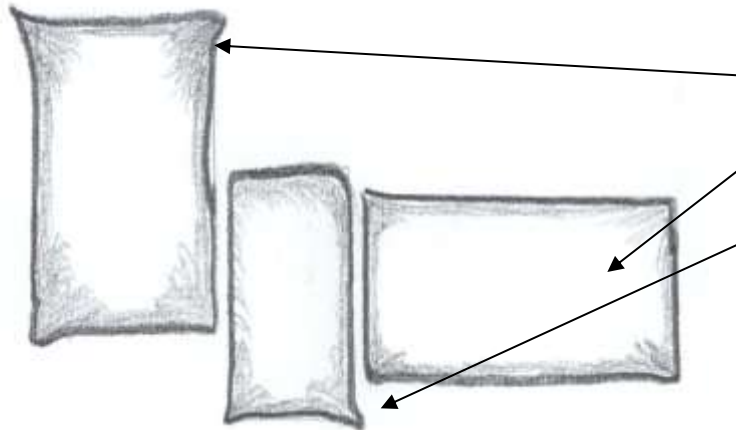


- 50 x 85 x 6cm flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.
- 50 x 85 x 6cm. flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi

- Ved halvside lammelse skal kroppen på den pågældende person lejres i forhold til central-akselen, med henblik på at støtte den berørte side. Pude lægges under hoved og den venstre arm støttes (Lammelse i venstre side, se tegning).
- Hvis man er i siddende stilling understøttes også under knæene med en universalpude.

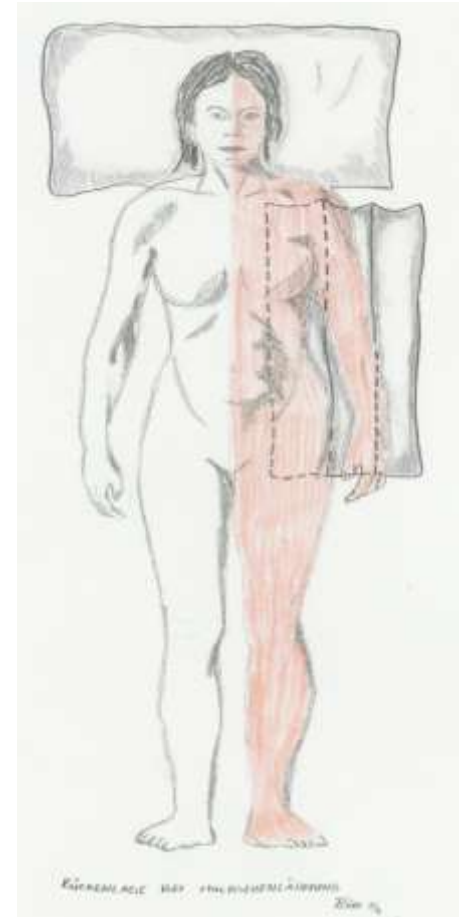

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi

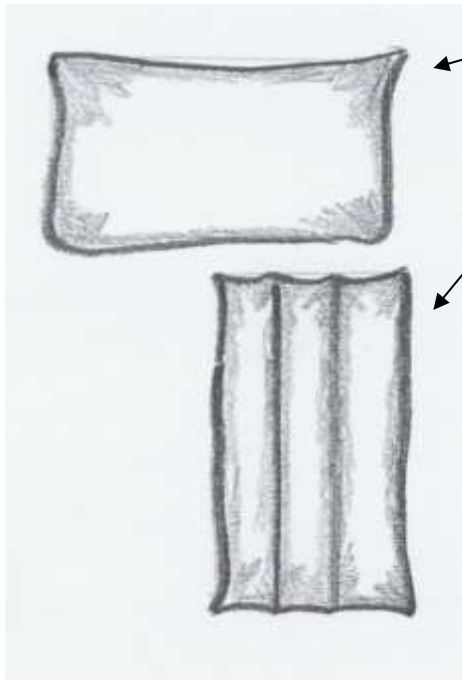


- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 415505, HMI nr. 55580.
- 80 x 80cm. Universal pude med 4 kamre, nr. 415705, HMI nr. 55582.


- **Lejringspuder til f.eks. Hemiparese lejrning kan også købes i et sæt:**
 - 30 x 40cm. Lejringspude, nr. 4152-05, HMI nr. 55579.
 - 40 x 75cm. Lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578.
 - 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
 - 40 x 95cm. Lejringspude, nr. 4156-05, HMI nr. 55576.
 - 80 x 80cm. Universal pude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582.
 - 50 x 85 x 6cm. Flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse.

- De 3 viste positioneringer (side 12 og 13) må kun ses som en tidsbegrænset lejrning. Lejringsmåden er særligt velegnet til at understøtte åndedrættet ved ryg leje. Lejrings metoderne medvirker til en udvidelse af lungerne og forbedrer respirationen ved luftvejsinfektioner.
- Disse lejringsmetoder kan også anvendes til at frilægge følsomme områder i forbindelse pleje af tryk sår eller ved aflastning af dele af skulblad og rygsøjle området.

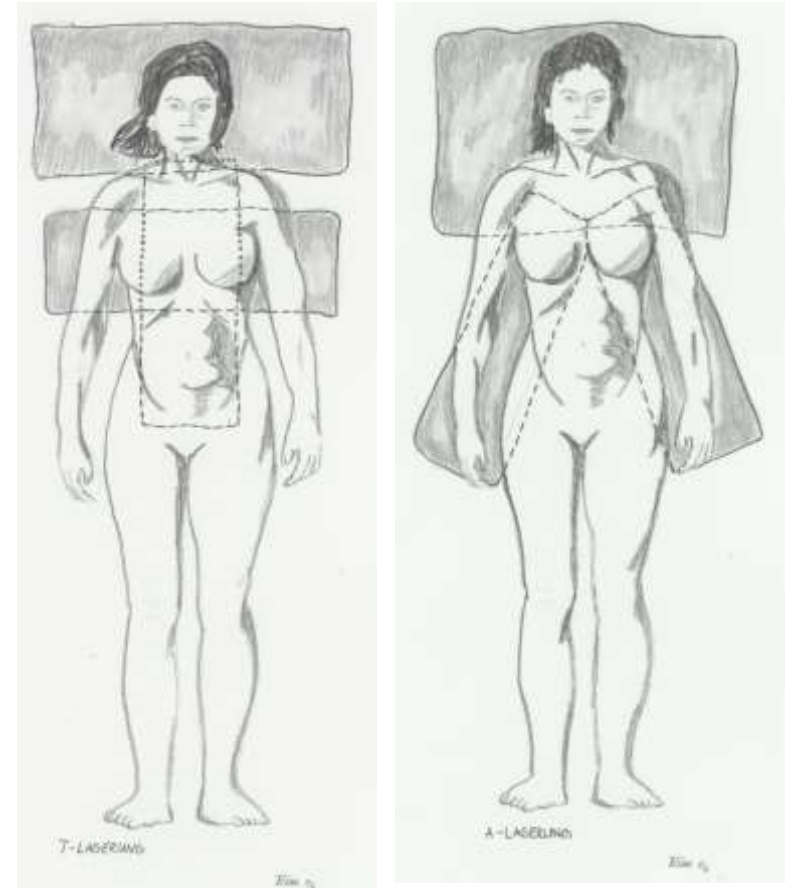

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

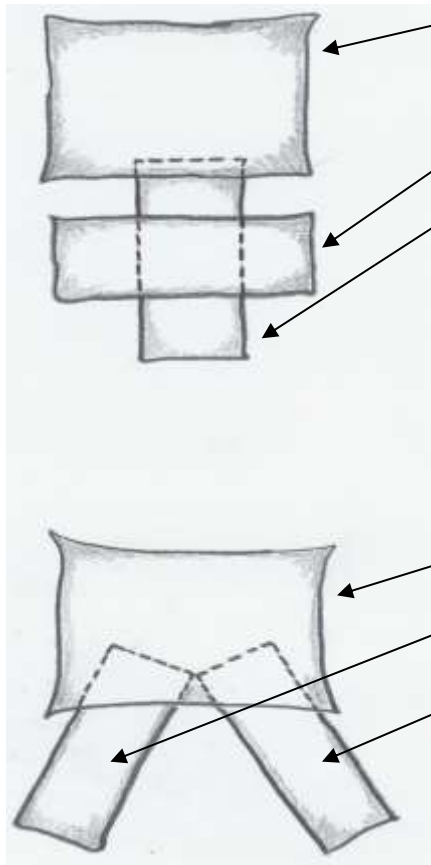


- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.

- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.


Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

- Efter operative indgreb i ryg regionen kan en af disse 3 lejrings typer indsættes til en varierende støtte- og aflastning.

Følgende placering af puder hjælper med til at øge en udvidelse af lungenes nedre område, ligeledes aflastes dele af skulderblad og ryggrad.

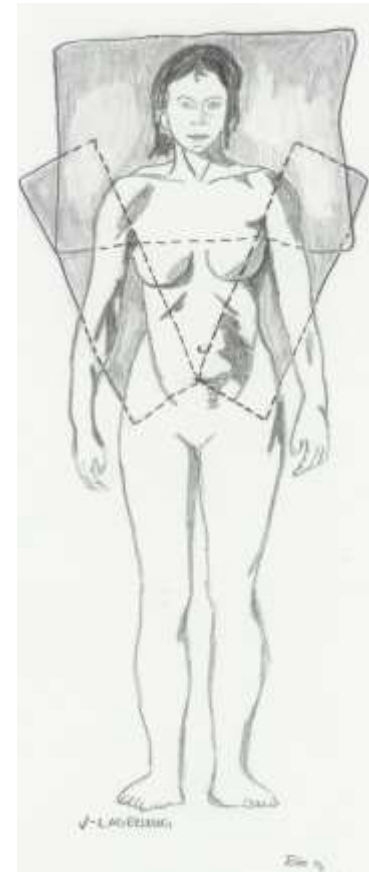

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

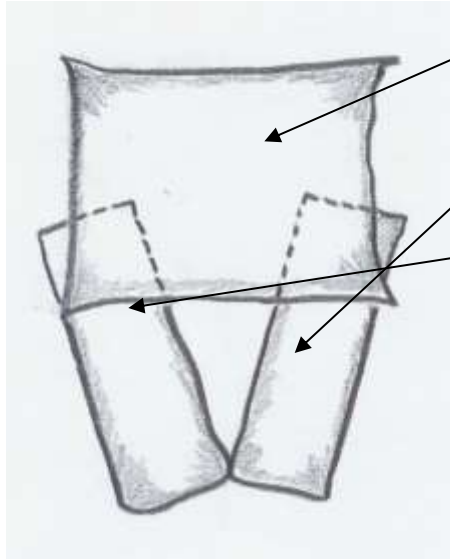

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.

Til A-T-V lejringen kan man udover puden på 45 x 80cm. supplere med 2 stk. 24 x 73cm. som anvist på tegningen.

Varekartotek

Nr.	Navn	Salgspris	Enhed	Bruttovægt	Rumfang
02-38910-B83	Betræk. PU , ARSOS BASIC	1.300,00	stk.	0,00	0,00
Varegruppe	Beskrivelse	Kostpris		Nettovægt	
2		500,00		0,00	
Kategori		Vejl. kostpris		Varerabatgruppe	
		500,00			
Stregkode	Lokation	Vejl. pris	Adgang		
38910-B83		0,00	Åben		
Minimumlager	Minimumordre				

OK
Annullér

Søg [a](#) [b](#) [c](#) [d](#) [e](#) [f](#) [g](#) [h](#) [i](#) [j](#) [k](#) [l](#) [m](#) [n](#) [o](#) [p](#) [q](#) [r](#) [s](#) [t](#) [u](#) [v](#) [w](#) [x](#) [y](#) [z](#) [æ](#) [ø](#) [å](#) 1-9 02-38

Faktura » Opsætning »

Varekartotek







Valuta:

Nr.	Navn	Gruppe	Salgspris	Kostpris	På lager	I ordre	Til rådighed	Bestilt
02-38910-B83	Betræk. PU , ARSOS BASIC Topmadras. Bredde 83 cm	2	980,00	500,00	2,00	0,00	2,00	0,00
02-38912-B83	Betræk. PU , ARSOS LIGHT Helmadræs. Bredde 83 cm	2	1.860,00	1.100,00	3,00	0,00	3,00	0,00
02-38912-SL	Betræk. PU , SLANGEAFDÆKNING.	2	200,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
02-38912	Vekseltrykmadræs ARSOS LIGHT -DEXOS DL wds Pumpe. Helmadræs -3 kammer system - Bredde 83 cm. Kategori I -IV efter EPUAP. ID nr.	2	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-38913	Vekseltrykmadræs ARSOS SOFT + DEXOS DL wds Pumpe. Helmadræs - 3 kammer system - Bredde 90 cm. Kategori I -IV efter EPUAP. ID nr.	2	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktliste, Lejringspuder

	LEJRINGSPUDE	<table border="1"> <tr><td>40 x 95cm - H: 5-9cm.</td><td>4156 05 .. - HMI nr. 55576</td></tr> <tr><td>40 x 75cm - H: 6-11cm.</td><td>4154 05 .. - HMI nr. 55578</td></tr> <tr><td>** 30x40cm - H: 6-8cm.</td><td>4152 05 .. - HMI nr. 55579</td></tr> <tr><td>** 45x80cm - H: 8-12cm</td><td>4155 05 .. - HMI nr. 55580</td></tr> <tr><td>24 x 73cm - H: 4-8cm.</td><td>4153 05 .. - HMI nr. 55581</td></tr> </table>	40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05 .. - HMI nr. 55576	40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. - HMI nr. 55578	** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. - HMI nr. 55579	** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. - HMI nr. 55580	24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. - HMI nr. 55581	<p>Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.</p>
40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05 .. - HMI nr. 55576												
40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. - HMI nr. 55578												
** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. - HMI nr. 55579												
** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. - HMI nr. 55580												
24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. - HMI nr. 55581												
	UNIVERSALPUDE 4 kamre	<table border="1"> <tr><td>** 80 x 80cm</td><td>4157 05 .. - HMI nr. 55582</td></tr> </table>	** 80 x 80cm	4157 05 .. - HMI nr. 55582	<p>Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: alle kroppsdele samt hæl/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæl mv.</p>								
** 80 x 80cm	4157 05 .. - HMI nr. 55582												
	RYGPUDE med LEJRINGSFANE	<table border="1"> <tr><td>** 85 x 85cm</td><td>4158 05 .. - HMI nr. 55583</td></tr> </table>	** 85 x 85cm	4158 05 .. - HMI nr. 55583	<p>Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fåseres" i den ønskede position. Puden ligger stabil. Den fyldte del er 40 x 85 cm.</p>								
** 85 x 85cm	4158 05 .. - HMI nr. 55583												
	Flad lejringspude	<table border="1"> <tr><td>** 50x85x6cm</td><td>4159 05 .. - HMI nr. 55584</td></tr> </table> <p>** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.</p>	** 50x85x6cm	4159 05 .. - HMI nr. 55584	<p>Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning</p>								
** 50x85x6cm	4159 05 .. - HMI nr. 55584												
	Pude til MICROLEJRING	<table border="1"> <tr><td>12 x 28cm H: 3-5cm.</td><td>4150 05 .. - HMI nr. 55586</td></tr> <tr><td>20 x 30cm H: 5-7cm.</td><td>4151 05 .. - HMI nr. 55587</td></tr> </table>	12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. - HMI nr. 55586	20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. - HMI nr. 55587	<p>Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".</p>						
12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. - HMI nr. 55586												
20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. - HMI nr. 55587												
	Lejringspude "Sø-slange" bl.a. til 30gr. lejrning S-FORM - anatomisk lejringspude "Søhest" HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk	<table border="1"> <tr><td>small - 30 x 200cm</td><td>4163 05 .. - HMI nr. 55597</td></tr> <tr><td>large - 30 x 260cm</td><td>4164 05 .. - HMI nr. 55598</td></tr> <tr><td>small - 183cm.</td><td>4170 05 .. - HMI nr. 55599</td></tr> <tr><td>large - 194cm.</td><td>4171 05 .. - HMI nr. 55600</td></tr> </table>	small - 30 x 200cm	4163 05 .. - HMI nr. 55597	large - 30 x 260cm	4164 05 .. - HMI nr. 55598	small - 183cm.	4170 05 .. - HMI nr. 55599	large - 194cm.	4171 05 .. - HMI nr. 55600	<p>Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene. "Sø-slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.</p>		
small - 30 x 200cm	4163 05 .. - HMI nr. 55597												
large - 30 x 260cm	4164 05 .. - HMI nr. 55598												
small - 183cm.	4170 05 .. - HMI nr. 55599												
large - 194cm.	4171 05 .. - HMI nr. 55600												
	Lejringsrulle	<table border="1"> <tr><td>20 x 100cm</td><td>4160 05 .. - HMI nr. 55594</td></tr> <tr><td>20 x 200cm</td><td>4161 05 .. - HMI nr. 55595</td></tr> <tr><td>20 x 260cm</td><td>4162 05 .. - HMI nr. 55596</td></tr> </table>	20 x 100cm	4160 05 .. - HMI nr. 55594	20 x 200cm	4161 05 .. - HMI nr. 55595	20 x 260cm	4162 05 .. - HMI nr. 55596	<p>Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.</p>				
20 x 100cm	4160 05 .. - HMI nr. 55594												
20 x 200cm	4161 05 .. - HMI nr. 55595												
20 x 260cm	4162 05 .. - HMI nr. 55596												
	U-FORM Lejringspude	<table border="1"> <tr><td>160cm</td><td>4165 05 .. - HMI nr. 55592</td></tr> <tr><td>190cm</td><td>4166 05 .. - HMI nr. 55593</td></tr> </table>	160cm	4165 05 .. - HMI nr. 55592	190cm	4166 05 .. - HMI nr. 55593	<p>På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placere bagved eller rundt om brugeren.</p>						
160cm	4165 05 .. - HMI nr. 55592												
190cm	4166 05 .. - HMI nr. 55593												


Produktliste, Lejringspuder mm.

	ØREPUDE	27 x 15 x 6cm.	418165 03.- HMI nr. 65057	Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.
	Arm-/Hælpude Kileformet	18 x 40 x 8/0cm.	416905 03.- HMI nr. 69442	Puden har to anvendelses muligheder. Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse forebyggende behandling af tryksår. Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvside lammelse.
	Hoftepude Kileformet	36 x 30 -10/12cm.	417205 03.- HMI nr. 69443	Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt spredning af ben så risikoen for Hoftelukation reduceres.
	Hælpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm.	583015 03.- HMI nr. 65055	En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop så puden kan fikseres til foden. Puden er skumfyldt og har som standard PU betræk med lynlås
	Knæpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm	201814 02.- HMI nr. 69441	Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så puden kan fikseres rundt om knæet.
	Innovativ personbeskytter til montering på sengehest (Skumfyldt)	L= 60 cm, h= 35cm L= 60 cm, h= 40cm L= 80 cm, h= 35cm L= 80 cm, h= 40cm L= 90 cm, h= 35cm L= 90 cm, h= 40cm	xx.- HMI nr. 69377 450075.- HMI nr. 55588 xx.- HMI nr. 69378 451075.- HMI nr. 55589 xx.- HMI nr. 69379 xx.- HMI nr. 69380	Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-mærker på arme og ben og giver desuden en god beskyttelse, når man sidder på sengekanten. Beskytterne kan anvendes på både enkelt og forhøjede sengeheste.

Øvrige produkter



- Surcon Care line ApS har i samarbejde med firmaerne ADL og EKAMED i Tyskland fået en stor ekspertise indenfor bl.a. udvikling, produktion- og salg af produkter til forebyggelse og behandling af tryksår, dynamiske madrasser, skum madrasser, lejringspuder og det sidste nye, et innovativt nyudviklet automatisk patient vende/tilt system **ekamove**.
- Kontakt os venligst på 8655 7045 for yderligere information vedrørende vore produkter
- Eller rekvirer Surcon produktmappe.

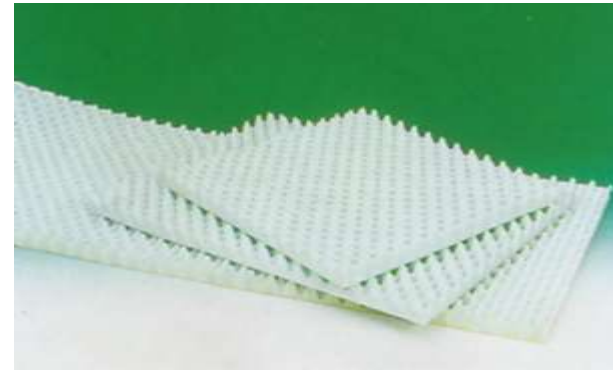

Service



- Der er mulighed for en afprøvning af SURCON'S PRODUKTER før et eventuelt køb.
- Ved et eventuel køb indenfor 30 dage fra udlåns/leje-dato på vore vekseltryks systemer, ***vil der ikke*** blive opkrævet leje af produkterne, selvom der er indgået en aftale om leje.
- DIVERSE SURCON PRODUKTER, udover vore vekseltryks systemer, der kan fås til afprøvning i ca. 14 dage u/beregning, kan vore andre produkter, siddepuder, lejringspuder, seler, sikkerhedssystemer til seng/stol osv fås i udlån i ca. 8 dage.
- Der er 24 timers døgnservice m.h.t. råd og hjælp.
Ring venligst på telefon 86 55 70 45.



Overgade 15 · 8700 Horsens ·
Kontor/lager: Torsted Allé 2E · 8700 Horsens·
Tlf. 86 55 70 45 · Fax 86 55 71 45
E-mail: mail@surcon.dk ·
www.surcon.dk