

ADL/Surcon arsos soft "air foam Hybrid" 3-kammer system med ny dexos® DL WDS - pumpe.

Januar 2015 – mappe afs. 2.



Nyhed!

CE

HMI nr.: 38913 - 90cm. madras.

3 kammer HELMADRAS princip. med ny dexos® DL WDS digital pumpe.

Indsættelse bl.a. til terapi understøttelse ved behandling af tryksår kategori: I-IV (EPUAP norm).

Anvendes til personvægt fra ca. 20 - 100kg.

Madras: 12cm. HELMADRAS PU/polyurethan. Består af 13 duplex celler (26 celler), indvendig sandwich skum med en stabiliserende rand zone forstærkning af madraskant.



Desuden har madrassen har en naturlig "Indbygget pleje funktion" og der er vekseltryk i hele madrassens længde, det giver bl.a. en mulighed for mave-lejring. Nyudviklet CPR funktion.

Pumpe: Mulighed for både vekseltryk- og statisk funktion og individuel indstilling af tryk og cyklostid.

3-kammer pumpe m/antivibrations system (AVS), og visuel og akustisk alarm.

Cyklus tid: valgfri mulighed for indstilling mellem 5 -10 -15 og 20 minutter.

NB: Med energi- og slidtage besparende automatisk start og stop pump-funktion!

Betræk: 2- vejs lækkert strækbart, åndbart inkontinens PU-betræk (PUR-ACTIV). Vaskbar ved 95gr.C. tumbles max 50gr. C

Surcon/ADL til børn & voksne.

MADRAS med "indbygget" pleje funktion.

ANVENDELSE: til understøttelse ved behandling af cachexia personer, samt ved spina bifida, paraplegi, ALS, cancer, sclerose, parkinsons sygdom, spasmer, lamelser, dekubitusprofylakse/og behandling af tryksår. Velegnet til understøttelse i smerteterapien.

Dobbelt virkning - dobbelt tryk med element- modulsystemet af det unikke, innovative og patenterede luft/skum/ madraskonstruktion air foam® hybridsystem til bl.a. dekubitus profylakse/terapi **Kategori I – IV (EPUAP).**

Cellernes konstruktion med varieret hårdhedsgrad i selve skumdelen giver en eminent / blid liggekomfort.

Randzoneforstærkning på hele madrassen, modvirker udskridning af brugeren ved ud / ind i sengen

Hårdhedsgraden varierer i alle madrassens cellerne (bliver blødere ind mod midten).

Madrassen kan anvendes enten til vekseltryk m/pumpe eller som statisk kombinations madras skum/luft.

Ved bl.a. el-svigt eller lignende undgår personen at ligge igennem på grund af de indvendige skumkerner / skumceller.

NB: Cellerne kan udskiftes under drift.

Mulighed for forlængelse af slangerne mellem madras/pumpe efter ønske!

NB: Madrashøjden passer perfekt til EU/HMI norm: højde sidegitter / sengehest og madras højde over sengebund.

NB: arsos soft madrassen alene uden pumpe kan bl.a. anvendes til indsættelse fra kategori I-II (EPUAP-norm).

VEND>>>

Indstilling af ny dexos DL WDS pumpe kombineret med 90cm. arsos soft HELMADRAS - HMI: 38913.



VÆLG MELLE M VEKSELTRYK eller statisk funktion.

Indstilling af personvægt:

Vægtfordelingen på en person er naturligvis noget forskellig, så man må prøve at vurdere m.h.t. skala indstilling ud fra personens status! **Cyklustid 10** er mest anvendt.

3. Rengøring / Desinfektion:

Madrascellerne: kan aftørres med vand og de mest gængse midler kan anvendes, **dog uden indhold af aldehyder og tensider. Kan også rengøres og desinficeres ved på sprøjtning med en forstøvet væske.**

Betræk: Det aftagelige 2 vejs strækbare inkontinens betræk (PU-PA) er vaskbart ved 95C⁰ – kan tumbles ved max. 50gr.C. Vægt betræk: ca. 0,9kg.

Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions-midler **uden aldehyder.** Kan også desinficeres kemoterisk **og ved på sprøjtning (forstøvet).**

Tekniske data:	arsos® soft 3-kammer madras alene	Med dexos® light ny wds pumpe
Materiale	Polyurethan (PU) Skumstof – 26 celler	ABS- Polymerisat
Vægt:	ca. 16,3kg	ca. 1,5kg
Pressehårdhed kPa	2,0 indvendig 4,0 udvendig	-
Rumvægt kg/m ³	25 indvendig 35 udvendig	-
Dimensioner madras cm. m/luft	200 x 90 x 12cm.	23 x 15 x 8,5cm.
Vægt i kg.	~ 16,3	~ 1,5
Fabriksgaranti	2 år	2 år
Tilslutning	-	230V - 50Hz/7W – 500mA.
Rengøring	Desinficeres -aftørring eller kemoterisk	Desinficeres ved aftørring
Anvendelses- område	Dekubitus profylakse- og/terapi Kategori I -II (EPUAP) (evt. med hånd pumpe)	Dekubitusprofylakse og/terapi Kategori I - IV ((EPUAP) Med pumpe og madras!

arsos soft – ”air foam Hybridsystem”
dexos light WDS – digital pumpe og
90cm. madras system – HMI 38913.

Indikationer / Kontraindikationer.

Funktion	Indikationer	Kontraindikationer
<p><u>Vekseltryk</u></p> <p>Med ny dexos DL WDS-pumpe.</p>	<p>Dekubitusprofylakse og- terapi- under støttelse <u>kategori I – IV.</u> EPUAP norm. Høj til meget høj risikograd Person vægt ca. 20 -100kg.</p>	<p>Instabile frakturer, sensibilitetstab, smerter, muskulær hypertonus (f.eks. kontrakturer, og spastiker), Personer med en krops- vægt over >100kg.</p>
<p><u>Statisk blød lejring med</u></p> <p>Med ny dexos light WDS-pumpe.</p>	<p>Dekubitusprofylakse- og terapi- understøttelse indtil Kategori I – IV. EPUAP norm. Smerter, muskulær hypertonus.</p>	<p>Instabile frakturer, sensibi- litetstab.</p>

**Kort forklaring om opstart og anvendelse af
90cm. arsos soft "hybridmadras" 3-kammer vekseltrykssystem
med ny dexos DL WDS pumpe.
HMI NR.: 38913 - 90cm.**

Januar 2015.

HUSK FØR OPSTART: LUK CPR-VENTILEN PÅ MADRASSEN - skal stå vandret!

VÆLG: VEKSELTRYK ELLER STATISK FUNKTION.

Ønskes vekseltryk: tryk Alternate (fast indstillet t/vekseltryk).

Ønskes statisk funktion: tryk Static, (= ens tryk i alle celler).

Den røde kontrollampe lyser til det indstillede tryk er nået. (Visuel alarm).

**1. MODUL-HELMADRAS (90cm.) arsos soft med dexos L. WDS.
Personvægt fra ca. 20 -100 kg / et 3-kammer madras hybridsystem.**

- a)** Helmadras med 13 duplex (26 PU - celler), er en 3- kammer lavtryks hybrid helmadras med en 2 lags "frit liggende/svømmende" PU- skumkerne i cellerne med plads til fri luft passage rundt om hver celle, der giver mulighed for at koble vekseltryk på systemet. **Skumcellerne bliver blødere mod midten!**
- b)** Madrassen kan også anvendes som et statisk madrasmodulsystem uden vekseltryks pumpe, men kan reguleres med håndpumpe individuelt i de 3 zoner.
- c)** Den specielle madras- konstruktion bevirker, at man ikke får problemer med at ligge igennem ved el svigt m.v. **Desuden er madrassen med en stabiliserende randzoneforstærkning og indbygget plejefunktion.**
- d)** **Nyt snapkoblings system.**
- e)** De langsgående luftslanger på madrassiden er fremstillet i silikone, så man undgår at få vedvarende knæk på slangerne efter sammenbøjning bl.a. i forbindelse med transport- eller pakning.
- f)** Madrasslangerne og pumpe bør være i fodenden.
- g)** Fastspændingsstropper med snapkobling kan fastgøre madrassen til selve sengen (de bevægelige dele), madrassen ligger herved fast ved forflytning.
- h)** Såfremt man sidder oprejst på madrassen i længere tid skrues op på pumpen.


2. PUMPE: Ny udviklet dexos DL WDS med visuel og akustisk alarm samt automatisk start/stop funktion!

3 - kammer lavtrykspumpe, med vægtskala med mulighed for indstilling
Fra en personvægt på ca. 20 til 100Kg.

Cyklus tid 5-10-15 og 20 min.

vend >

Indstilling af ny dexos light WDS pumpe sammen med arsos soft HELMADRAS 90cm. HMI: 38913

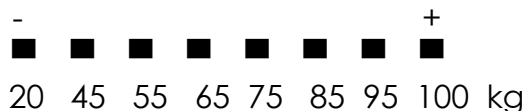

Vægtfordelingen på en person er naturligvis noget forskellig, så man må prøve at vurdere m.h.t. pumpe skala – indstilling ud fra personens statur.

3. Rengøring / Desinfektion:

Madrascellerne: aftørres med vand og de mest anvendelige sæber kan anvendes, uden brug af aldehyder og tensider.

Betræk: Det aftagelige 2 vejs strækbare inkontinens betræk (PU-PA) er vaskbart ved 90C⁰ – kan tørre tumles ved lav temperatur.

Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions-midler **uden aldehyder**. Kan også desinficeres kemotermisk.

NB: Både pumpe og madras kan rengøres/desinficeres på på sprøjtning (forstøvet).

Navn:	arsos® soft madras	Ny dexos® light wds pumpe
Materiale	Polyurethan (PU) Skumstof – celler	ABS- Polymerisat
Vægt	16,3kg	1,5kg
Pressehårdhed kPa	2,0 indvendig 4,0 udvendig	-
Rumvægt kg/m ³	25 indvendig 35 udvendig	-
Dim. madras luft fyldt	200 x 90 x 12	23 x 15 x 8,5cm.
Vægt i kg.	~ 6,0	~ 1,5
Fabriksgaranti	2 år	2 år
Tilslutning Sikring	-	230V - 50Hz / 7 W, 500 mA
Rengøring	Desinficeres -aftørring eller kemotermisk	Desinficeres ved aftørring Se også ovenfor pkt. 3.
Anvendelses- område	Dekubitusprofylakse og/terapi Kategori I -II (EPUAP) (Uden vekseltryks- pumpe) (evt. med håndpumpe)	Dekubitusprofylakse og/terapi Kategori I - IV (EPUAP) Med ny dexos DL WDS-pumpe.

PU betrækket er vaskbart ved 95 grader c. Vægt ca. 0,9kg.