


SURCON AMNICOT.

Januar 2014

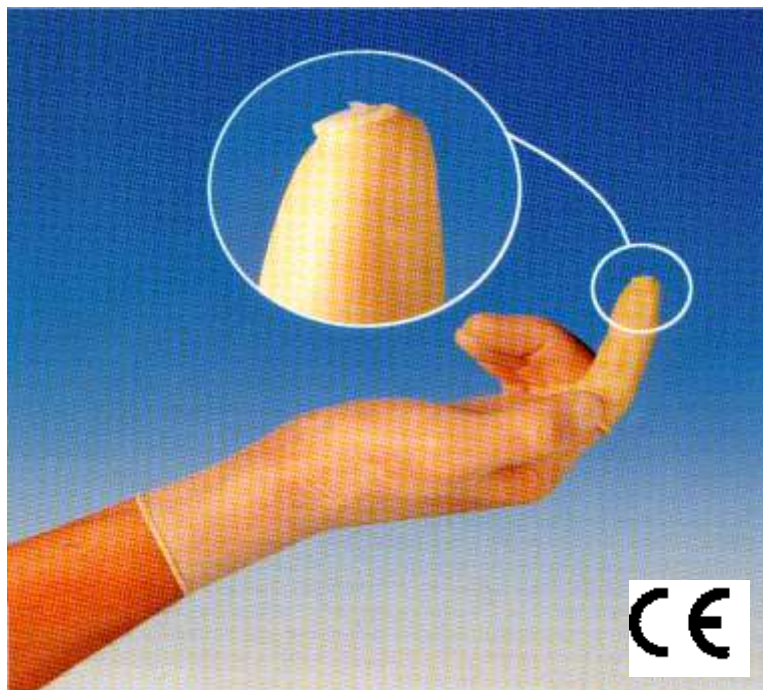

Surcon vare nr.: 19-5000 (afløser 07-5000)

[et innovativt produkt til amniotomien!](#)


- let at håndtere.
- formindsker risikoen for den fødende.
- trækkes på langemand -evt. på pegefinger.
- man rammer præcist med "katte kloen"
- sjældent nødvendigt med ekstra assistance.
- engangsprodukt i steril indpakning.
- pakning á 100 stk.

V E N D >>

AMNICOT er en fingertut med en integreret "katteklo".

AMNICOT trækkes på langemanden (eller pegefingern) på den explorerende hånd. Åbningen af fosterhinden bliver en let sag for læger og jordemødre.

- kun en finger og intet instrument bliver ført ind i cervix.
- en mindre udvidelse af cervix betyder færre smerter for den fødende.
- den fødendes frygt minimeres ved anvendelse af AMNICOT end ved brug af instrumenter.
- jordemoderen/lægen ved nøjagtigt hvor "katte kloen" er i vagina, og behøver i de fleste til fælde ingen assistance.
- fingeren er fleksibel i modsætning til andre instrumenter.
- steril, til engangsbrug.

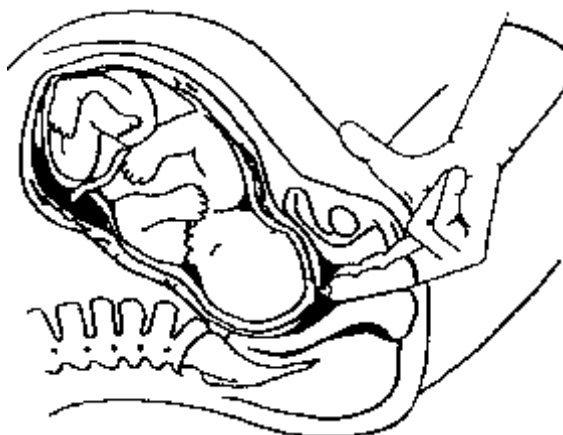

BESKRIVELSE OG BRUGSVEJLEDNING.

AMNICOT er konstrueret så den gør det lettere at sprænge de amniotiske membraner. Den oprindelige anbefaling indskrænkede sig til at fremhæve produktets fordele i tilfælde, hvor livmoderhalsen ligger posterior. AMNICOT har vist sit værd, hvor den bagud vendte livmoderhals besværliggør en åbning af fosterhinden. I dag bliver AMNICOT brugt rutinemæssigt ved hindsprængning, fordi det foregår uden brug af instrumenter.

FORDELENE FOR DEN FØDENDE:

At anvende AMNICOT undgås angstfølelser, der ofte opstår ved synet af instrumenter. Den fødende bliver udsat for færre smerter, da man oftest kun fører en finger op i cervix, i stedet for to eller flere fingre, der sædvanligvis er nødvendigt ved indførelse af instrumenter. Selv ved bagud vendte livmoderhals skal der ikke ændres fødselsleje for at foretage en hindsprængning. Jordemoderens/lægens finger kan under vaginalexplorationen bevæge sig op gennem livmoderhalsen.

FORDELENE FOR LÆGEN/JORDEMODEREN:

Jordemoderen/lægen kan med den ene hånd frit palpere barnets hoved og udvendigt holde det fast i bækkenet, imens man med den anden hånd vaginal-explorerer. I praksis trækkes Amnicot på pegefingern eller langemand, så at hægten sidder tæt under fingerspidsen pegende ned mod håndfladen. Derefter påbegyndes den vaginale exploration ved blidt at føre en finger gennem livmoderhalsen/munden for at undersøge og klarlægge de vaginale forhold, og om hindsprængning er indiceret eller kontraindiceret. Normalt bliver langemand brugt til dette, hvis Amnicot er på pegefingern og omvendt. Uden at tage fingrene ud af vagina føres fingeren iført Amnicot igennem livmoderhalsen. Normalt kan det mærkes, hvornår "katte kloen" er trængt igennem membranen/fosterhinden.